

# Radical-7® opladen met Root®

Het doel van dit bulletin is het geven van bijgewerkte informatie met betrekking tot een mogelijk trager dan verwachte oplaadsnelheid van het Radical-7-apparaat wanneer het voor het opladen in een Root-apparaat wordt gedockt.

## ACHTERGROND

Masimo heeft na het op de markt brengen feedback ontvangen waaruit blijkt dat sommige Radical-7-apparaten langzamer dan verwacht worden opgeladen wanneer ze in een Root worden gedockt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de Radical-7-apparaten opladen met een snelheid die leidt tot een volledige oplaadduur van meer dan 6 uur.

Masimo heeft dit probleem niet waargenomen wanneer de Radical-7 wordt opgeladen met een Radical®-dockingstation.

## UIT TE VOEREN STAPPEN

Als u problemen met opladen ondervindt, raadt Masimo op basis van gebruikssituaties het volgende aan:

### **Radical-7 gedockt in Root voor bewaking van vitale functies, gemonteerd op rolstandaard**

Schakel bij het opladen zowel de Radical-7 als de Root uit wanneer ze niet in gebruik zijn, om ervoor te zorgen dat de Radical-7 zo snel mogelijk volledig wordt opgeladen.

### **Radical-7 gedockt in Root voor bewaking aan het bed**

In gebruikssituaties waarin de Radical-7 continu in een Root-apparaat gedockt is en de Root permanent is aangesloten op netvoeding, wordt de workflow niet beïnvloed.

In gebruikssituaties waarin het Radical-7-apparaat uit de Root wordt genomen voor transport of draagbaar gebruik, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig opgeladen blijft door de Radical-7 uit te schakelen voordat u deze ontkoppelt en met de bewaking start.

Als u op dit moment geen problemen ondervindt bij het opladen van de Radical-7, is er geen verdere actie noodzakelijk. Er zijn geen andere problemen bekend die de functionaliteit van het Radical-7-apparaat beïnvloeden.

Zijn na de hierboven beschreven handelingen de trage oplaadomstandigheden niet verholpen, neem dan contact op met Technical Services voor hulp.

Neem bij vragen of als u meer hulp nodig hebt contact op met uw regionale Technical Services-team op: <https://www.masimo.com/contact-support/support/technical-services/>

Let op: volgens de federale wetgeving (in de VS) mag dit apparaat uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht. Zie de gebruiksaanwijzing voor volledige voorschrijfinformatie, waaronder indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

© 2026 Masimo. Alle rechten voorbehouden. I PLCO-008175/PLM-15502A-0526 EN-PLM-15497A

Masimo U.S.  
Tel: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

Masimo International  
Tel: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

