

Recharge du Radical-7[®] avec Root[®]

L'objectif de ce bulletin est de fournir des informations mises à jour relatives à une vitesse de recharge potentiellement plus lente que prévu pour le dispositif Radical-7 lorsqu'il est raccordé à un dispositif Root pour la recharge.

CONTEXTE

Masimo a reçu des retours après commercialisation indiquant que certains dispositifs Radical-7 se rechargent à une vitesse plus lente que prévu lorsqu'ils sont raccordés à un Root. Dans certaines conditions, les dispositifs Radical-7 peuvent se recharger à une vitesse qui entraîne une durée de recharge complète supérieure à 6 heures.

Masimo n'a pas observé ce problème lorsque le Radical-7 est rechargé avec une station d'accueil Radical[®].

ÉTAPES À SUIVRE

Si vous rencontrez ce problème lié à la recharge, Masimo vous recommande les options suivantes, en fonction des cas d'utilisation :

Radical-7 raccordé à Root pour la surveillance des signes vitaux, monté sur des chariots à roulettes

Pendant la charge, mettez le Radical-7 et Root hors tension lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin d'obtenir un temps de recharge complète plus court pour le Radical-7.

Radical-7 inséré dans Root pour la surveillance au chevet du patient

Pour les cas d'utilisation dans lesquels le Radical-7 reste connecté en continu à un dispositif Root et où Root est connecté de façon permanente à l'alimentation secteur, le flux de travail n'est pas affecté.

Pour les cas d'utilisation où le dispositif Radical-7 peut être retiré de Root pour le transport ou l'utilisation portative, assurez-vous que la batterie est complètement rechargée en mettant le Radical-7 hors tension avant de le retirer de la station d'accueil et procéder à la surveillance.

Si vous ne rencontrez actuellement aucun problème pour recharger le Radical-7, aucune action supplémentaire n'est requise. Il n'existe aucun autre problème connu affectant le fonctionnement du dispositif Radical-7.

Si les actions décrites ci-dessus ne résolvent pas le problème de recharge lente, veuillez contacter le service technique pour obtenir de l'aide.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'équipe régionale des services techniques à l'adresse : <https://www.masimo.com/contact-support/support/technical-services/>

Attention : en vertu de la loi fédérale (des États-Unis), ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.

Consultez le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, y compris les indications, les contre-indications, les avertissements et les précautions.

© 2026 Masimo. Tous droits réservés. | PLCO-008175/PLM-15504A-0526
EN-PLM-15497A

Masimo U.S.
Tél. : 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tél. : +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

