

Recharge du Radical-7® avec le Root®

Le présent bulletin vise à fournir des renseignements à jour concernant un taux de recharge possiblement plus lent que prévu de l'appareil Radical-7 lorsqu'il est placé dans le dispositif Root pour la recharge.

CONTEXTE

Dans le cadre de la période post-commercialisation, Masimo a reçu des commentaires indiquant que certains appareils Radical-7 se rechargent plus lentement que prévu lorsqu'ils sont placés dans un dispositif Root. Dans certaines conditions, le temps de recharge complète des appareils Radical-7 peut nécessiter plus de six (6) heures.

Masimo n'a pas observé ce problème lors de la recharge du Radical-7 dans une station d'accueil Radical®

ÉTAPES À SUIVRE

Si vous éprouvez des problèmes lors de la recharge de votre appareil, Masimo recommande les mesures suivantes selon les cas d'utilisation :

Radical-7 sur station Root avec support mobile en surveillance des signes vitaux

Lors de la recharge, lorsque le Radical-7 et le Root ne sont pas utilisés, éteignez-les pour réduire au minimum le temps nécessaire pour recharger complètement le Radical-7.

Radical-7 installé dans une station Root pour la surveillance au chevet

Pour les cas d'utilisation où le Radical-7 reste en permanence dans une station Root elle-même branchée en continu à l'alimentation c.a., le flux de travail n'est pas affecté.

Pour les cas d'utilisation où le Radical-7 peut être retiré de la station Root pour le transport ou l'usage portable, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée, en éteignant le Radical-7 avant le retrait et la surveillance.

Si vous n'éprouvez actuellement aucun problème lors de la recharge du Radical-7, aucune mesure supplémentaire n'est requise. À notre connaissance, il n'existe aucun autre problème touchant le fonctionnement du Radical-7.

Si les mesures décrites ci-dessus ne règlent pas le problème de recharge lente, veuillez communiquer avec le Service technique pour obtenir de l'aide.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez communiquer avec votre équipe régionale des services techniques à l'adresse <https://www.masimo.com/contact-support/support/technical-services/>

Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis restreint l'utilisation de ce dispositif aux médecins ou exige une ordonnance médicale. Consultez le mode d'emploi pour connaître tous les renseignements relatifs à la prescription, y compris les indications, les contre-indications, les avertissements et les précautions.

© 2026 Masimo. Tous les droits réservés. 1 PLCO-008175/PLM-15501A-0526
EN-PLN-15497A

Masimo U.S.
Tél. : 1 877 4-Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tél. : +41 32 720-1111
info-international@masimo.com

